



## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza **AFTIFIX<sup>®</sup>, gel oral**, chiar dacă ați mai utilizat acest dispozitiv medical. Este posibil ca aceste informații să se fi modificat de la ultima utilizare, conform ultimelor cercetări în domeniu.

Acest dispozitiv medical poate fi eliberat fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizați **AFTIFIX<sup>®</sup>, gel oral** cu atenție pentru a obține cele mai bune rezultate. Păstrați aceste instrucțiuni. Se poate să fie necesar să le recitiți.

### Informații generale

Aftele sunt cele mai frecvente leziuni ale mucoasei orale, afectând aproximativ 20% din populație, cu preponderență femei. Aftele sunt ulceratii ale mucoasei bucale, de natură neinfecțioasă, sub forma unor leziuni mici, mărginite de un halou roșu și însoțite de senzația de arsură și durere. Printre factorii favorizanți enumerăm: imunitatea scăzută, dereglările hormonale, stresul emoțional, surmenajul, bolile infecțioase, deficiența de acid folic sau de vitamine B, consumul anumitor alimente (alune, nuci, fructe, citrice), administrarea unor medicamente (ex.: antiinflamatoarele nesteroidiene), radioterapie sau chimioterapie.

Un alt tip de leziuni bucale foarte dureroase sunt leziunile herpetice orale cauzate de virusul *Herpes simplex*. Acestea apar inițial sub forma unor vezicule care se sparg rapid, eliminând un lichid transparent și lăsând în urmă o leziune deschisă care formează crustă după câteva zile.

Alte afecțiuni care provoacă leziuni la nivelul mucoasei orale sunt lichenul plan (caracterizat prin erupții veziculare liniare, cu suprafața netedă, lucioasă, care produc durere, inflamație sau senzație de arsură), boala Behçet (ulcerații bucale și genitale recurente), boala Crohn (în faza incipientă, când apar ulcerații ale mucoaselor, inclusiv cea bucală).

Leziuni la nivelul cavității orale pot apărea și în cazul candidozei orale (caracterizată prin formarea de zone roșii, presărate cu zone de eroziune, asociate cu usturime și senzație de arsură), gingivitelor și parodontitelor (afecțiuni gingivale inflamatorii care, netratate, evoluează spre pierderea danturii), purtării de aparate și proteze dentare, după extracții dentare și alte intervenții chirurgicale minore, precum și după radio- sau chimioterapie.

### Informații despre produs

**AFTIFIX<sup>®</sup>, gel oral**, prin ingredientele conținute, asigură sănătatea și igiena mucoasei orale. Prin formarea unei pelicule hidratante ce aderă la cavitatea bucală, **AFTIFIX<sup>®</sup>, gel oral** protejează zonele afectate, accelerează refacerea mucoasei lezate și ameliorează durerea și inflamația.

### Indicații

- afte bucale, inclusiv stomatita aftoasă recurentă
- herpes oral, inclusiv gingivostomatita herpetică
- afecțiuni gingivale inflamatorii: sângerări gingivale, gingivite, parodontite
- leziuni ale mucoasei orale cauzate de purtarea aparatelor și protezelor dentare
- microleziuni asociate candidozei orale (stomatită candidozică)
- traumatisme post-chirurgicale, leziuni după extracții dentare
- stomatite secundare tratamentelor radio- sau chimio-terapice
- tratament adjuvant al leziunilor orale care survin în unele afecțiuni sistemice, precum lichenul plan, boala Behçet, boala Crohn

### Beneficii

**AFTIFIX<sup>®</sup>, gel oral**, prin conținutul în hialuronat de sodiu, extracte naturale de aloe, nalbă, salvie, ulei de roiniță, precum și în polimeri bioadezivi:

- formează o peliculă ce aderă la mucoasa bucală, protejând zonele afectate
- ameliorează durerea provocată de terminațiile nervoase expuse
- accelerează procesul natural de vindecare a leziunilor bucale
- favorizează refacerea gingivilor și oprirea sângerării
- calmează procesul inflamator local



Dispozitiv medical

- hidratează crustele tari formate în procesul de vindecare a veziculelor herpetice, prevenind formarea cicatricilor
- inhibă dezvoltarea plăcii bacteriene
- inhibă replicarea virusului *Herpes simplex* responsabil de apariția herpesului oral

### Mod de administrare

- **Copii și adulți:** aplicați o cantitate mică de gel (de dimensiunea unui bob de mazăre) la nivelul leziunii, de 3 ori pe zi, preferabil după masă și după efectuarea igienei orale, până la dispariția simptomelor. Pentru un efect mai bun, se recomandă evitarea periajului sau a consumului de alimente și lichide cel puțin 30 minute după aplicare.

În cazul administrării produsului la copiii mai mici de 2 ani, se recomandă atenție sporită pentru a evita înghițirea acestuia și riscul de sufocare.

### Efecte nedorite

Până în prezent nu au fost raportate efecte nedorite la acest produs sau la produse similare.

### Atenționări și precauții

Nu utilizați produsul în caz de hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului. Dacă ambalajul prezintă deteriorări ce compromit integritatea tubului, nu folosiți acest produs. Nu aruncați ambalajul gol în mediul înconjurător.

### Condiții de păstrare

- ⚠️ A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
- 🌡️ A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

### Compoziție

Acid hialuronic (sare de sodiu), extract de aloe (*Aloe vera*), extract de nalbă (*Althaea officinalis*), extract de salvie (*Salvia officinalis*), ulei esențial de roiniță (*Melissa officinalis*), xilitol, glicerol, propilenglicol, carbomer, hidroxid de sodiu, polivinilpirrolidonă, extract de *Stevia rebaudiana*, ulei de ricin hidrogenat și polietoxilat, sorbat de potasiu, benzoat de sodiu, apă purificată.

### Ambalaj

Cutie de carton cu un tub de 5 g, 10 g sau 15 g gel și instrucțiuni de utilizare.

### Data expirării

- 📅 A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**AFTIFIX<sup>®</sup>, gel oral** este un dispozitiv medical din clasa I, nesteril și fără funcție de măsurare, conform Directivei Consiliului European pentru dispozitive medicale 93/42/EEC.

Data la care aceste instrucțiuni au fost revizuite: octombrie 2018

	Atenționare		Producător
	Număr lot (serie)		Data de expirare
	Citiți instrucțiunile de utilizare		Păstrați la temperaturi sub

LOOK AHEAD S.R.L.

Șos. Păcurari nr. 127, 700544, Iași, România  
Tel.: 0232.252.800

